

ACCU-CHEK® Instant

Roche

New



Strip ejector button

Strip port

Meter navigation button

Target Range Indicator

Meter navigation button



Test strip

คู่มือการใช้งาน แอคคิว-เชค อินสแตนท์



หยิบแถบทดสอบออกจากขวด และใส่แถบบนด้านปลายโลหะเข้าไป ในตัวเครื่อง จากนั้นเครื่องจะเปิดเอง โดยอัตโนมัติ



เจาะเลือดจากปลายนิ้วเมื่อ สัญลักษณ์รูปหยดเลือด ปรากฏ กระพริบ ปรากฏขึ้น




แตะหยดเลือดบริเวณปลายด้าน **ขอบสีเหลืองจนเต็ม** จากนั้นจะ ปรากฏสัญลักษณ์นาฬิกาทราย กระพริบ ห้ามหยดบนพื้นผิว ด้านบนของแถบทดสอบ



ผลการตรวจจะปรากฏขึ้น ที่หน้าจอภายใน 4 วินาที ซึ่ง ลูกศรจะชี้แถบสีเพื่อบ่งบอก ระดับน้ำตาล สูง กลาง ต่ำ เมื่อกำหนดการทดสอบเสร็จ ให้กดปุ่มต้นแถบทดสอบเพื่อทิ้ง

วิธีการดาวน์โหลด Application และการเชื่อมต่อข้อมูล

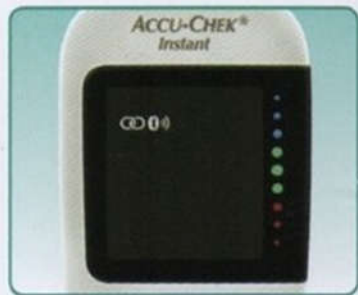

1. ดาวน์โหลด mySugr application ในโทรศัพท์มือถือ

2. วนเครื่อง Accu-Chek Instant ปิดอยู่ กดปุ่มขวาที่ด้านข้าง ▼ ของตัวเครื่องค้างไว้จนสัญลักษณ์ ปรากฏและกระพริบ

3. เปิด mySugr application ที่โทรศัพท์มือถือ กดเข้าไปที่เมนู Connections > Accu-Chek Instant หลังจากนั้นเลือกเครื่องของคุณ

4. เมื่อเรียบร้อยแล้ว วันที่ และ เวลาจะถูกติดตั้งซึ่งสามารถ เริ่มต้นการตรวจวัดค่าน้ำตาล ในเลือด และดูค่าน้ำตาลย้อนหลังได้ด้วย mySugr application

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้



สัญลักษณ์แจ้งเตือน และการแก้ไข Accu-Chek Instant



E-1 แถบตรวจมีปัญหา

แถบตรวจอาจได้รับความเสียหายหรือเสีย แถบตรวจไม่เหมาะสมหรือถูกนำมาใช้ซ้ำ กอดและเสียบแถบตรวจอีกครั้งหรือเปลี่ยนแถบตรวจใหม่



E-4 ปริมาณเลือดน้อยเกินไป

ปริมาณเลือดหรือน้ำยาตรวจสอบคุณภาพ ไม่เพียงพอในการตรวจ ให้ทำการทดสอบใหม่



E-7 ระบบของเครื่องขัดข้อง

มีความผิดปกติของอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่อง กอดแบตเตอรี่ออก กดปุ่ม power ค้างไว้ 2 วินาที จากนั้นใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไป แล้วจึงทำการตรวจค่าน้ำตาล



E-9 เปลี่ยนแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ใกล้หมด ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ หากยังขึ้นข้อความเดิม ให้กอดแบตเตอรี่ออกแล้วกดปุ่ม OK ค้างไว้ 2 วินาที จากนั้นใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไปอีกครั้ง



E-11 แถบตรวจมีปัญหา

แถบตรวจอาจได้รับความเสียหาย ทำการทดสอบด้วยแถบตรวจแผ่นใหม่



E-13 แถบตรวจมีปัญหา

อาจมีของเหลวหรือวัสดุแปลกปลอม อยู่ในช่องใส่แถบตรวจ นำแถบตรวจออกและใส่เข้าไปใหม่หรือทำการตรวจวัดค่าน้ำตาลในเลือด หรือการทดสอบซ้ำด้วยแถบตรวจใหม่ หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อบริษัทฯ



E-3 การทดสอบมีปัญหา

เครื่องหรือแถบตรวจมีปัญหา ให้ทำการตรวจวัดค่าน้ำตาลในเลือดซ้ำถ้ารหัส E-3 ยังปรากฏขึ้น ให้ดำเนินการตรวจสอบด้วยน้ำยาตรวจสอบคุณภาพด้วยแถบตรวจใหม่

- ในบางกรณี รหัส E-3 ปรากฏ บ่งชี้ว่าระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วย อาจมีค่าสูงเกินกว่าปกติมาก และเกินค่าที่เครื่องสามารถอ่านได้
- หากท่านไม่รู้สึกว่าคุณค่าสูงในเลือดสูงมากผิดปกติ ให้ทำการตรวจสอบน้ำตาลในเลือดซ้ำ
- หาก E-3 ยังคงปรากฏอยู่ ให้ติดต่อแพทย์ผู้รักษา



E-6 หยอดเลือดเร็วไป

หยอดเลือดหรือน้ำยาตรวจสอบบนแถบตรวจก่อนมีรูปหยดเลือด กระพริบหน้าจอ ให้ทำการทดสอบใหม่ด้วยแถบตรวจใหม่



E-8 อุณหภูมิมีปัญหา

เครื่องอยู่ในช่วงอุณหภูมิที่ทำการทดสอบได้ (4-45°C) ให้ย้ายเครื่องไปอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมและทำการตรวจวัดค่าน้ำตาลหรือตรวจสอบด้วยน้ำยาตรวจสอบคุณภาพ



E-10 เวลา/วันที่ ไม่ถูกต้อง

การตั้งค่าเวลา และวันที่อาจไม่ถูกต้อง ตรวจสอบการตั้งค่าเวลาและวันที่ให้ถูกต้อง



E-12 พบปริมาณ ascorbate สูง

พบปริมาณ ascorbate สูงในตัวอย่างเลือดที่ตรวจ ให้ปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ



E-14 ระบบเครื่องมีปัญหา

ติดต่อ บริษัทฯ ระบบเครื่องมีปัญหา

“โฆษณาโดยตรงต่อผู้ประกอบการวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับการยกเว้นโดยไม่ต้องขออนุญาต”

“อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้”

บริษัท โรช ไดแอโกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 18 อาคาร สภาทาวเวอร์ 1 555 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02-791-2222 BB19602 / AN6400239 ใช้เผยแพร่ได้จนถึง 28 มี.ค. 67

CALL CENTER
0-2791-2222



www.accu-chek.co.th